



Angulus 2 – Winkelschraubendreher

Quick Guide


Set-up

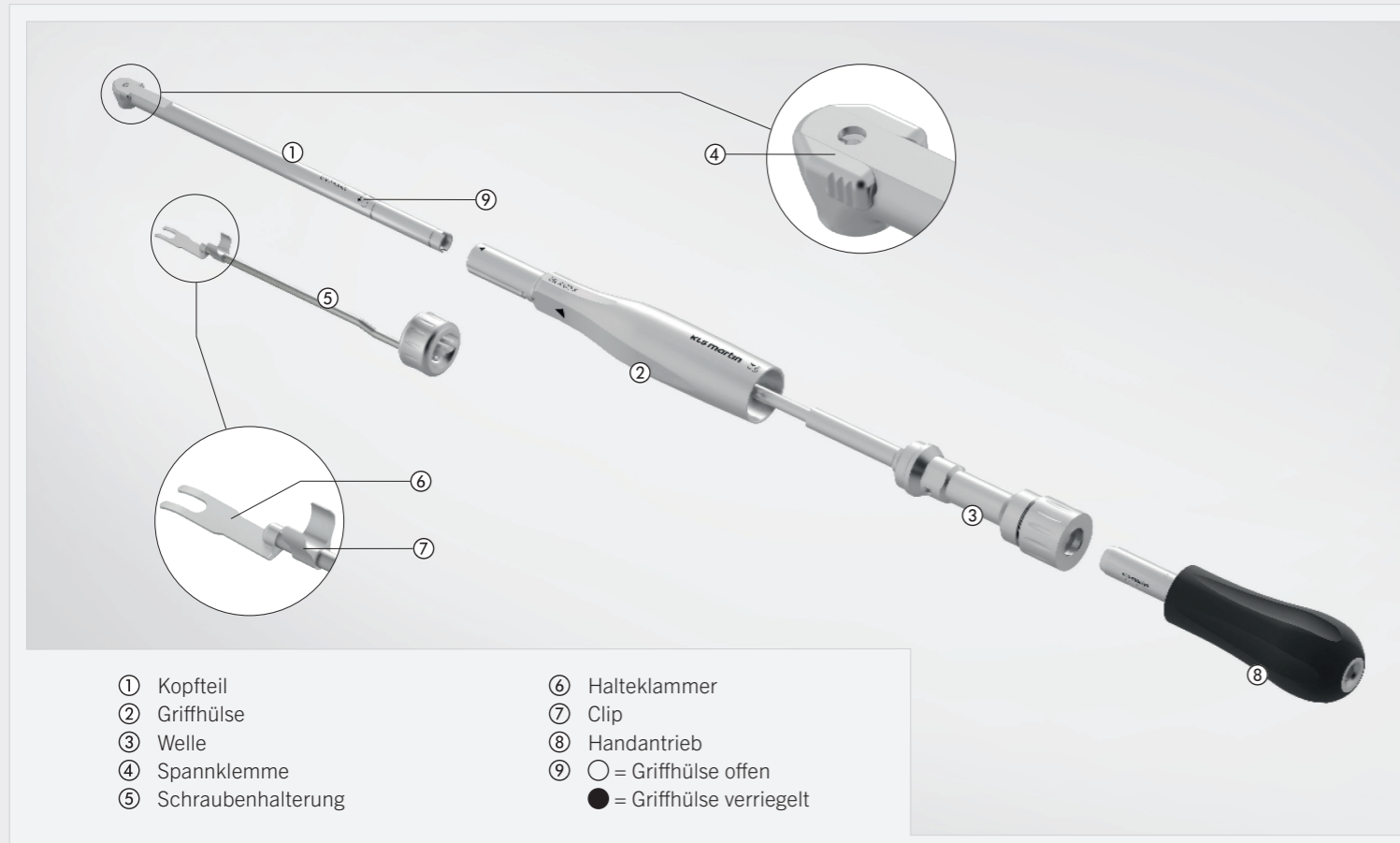


Montage (Demontage in umgekehrter Reihenfolge)

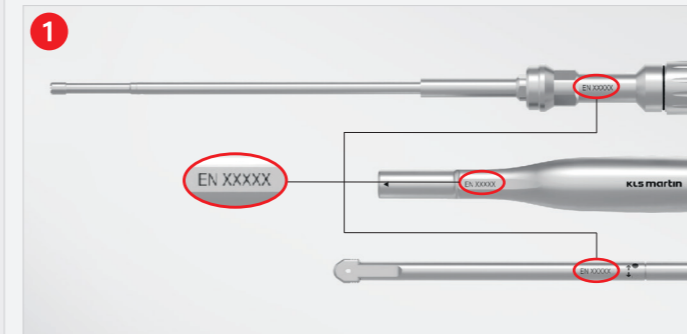


Hier müssen die Seriennummern aller Teile übereinstimmen.

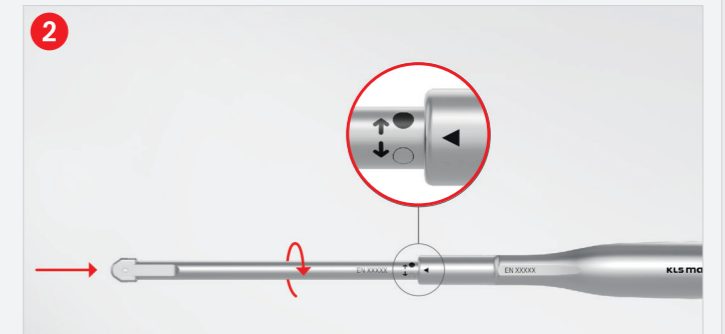

Das Kopfteil bis zum Anschlag in die Griffhülse stecken. Dabei auf die Symbole achten und von ○ nach ● bis zur Verriegelung drehen.

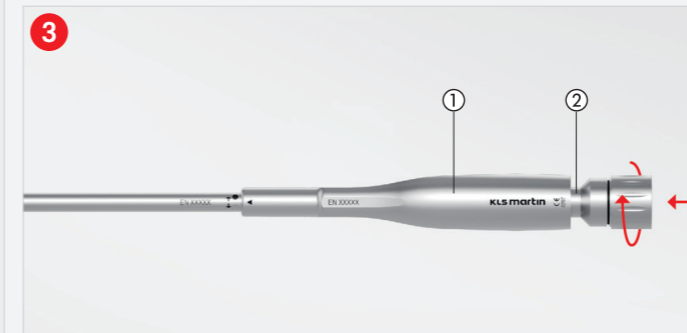

In die Griffhülse ① wird die Welle ② gesteckt und festgeschraubt.

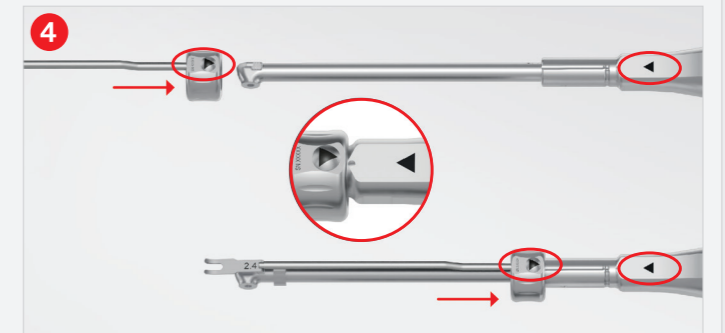

Die Schraubenhalterung aufschieben, bis sie hörbar einrastet. Dabei auf die Positionierung achten und den Clip festziehen.

Wichtiger Hinweis

Der Winkelschraubendreher darf mit maximal 10.000 U/min betrieben werden!

Weitere Informationen zum Winkelschraubendreher erhalten Sie über die nebenstehenden QR-Codes in der Broschüre und im Video.



Broschüre



Video

Pflege



Zur Pflege nur das W&H Service Oil F1 benutzen. Artikelnummer bei W&H: 10940021

Lagerung



Für die sichere Lagerung empfehlen wir den Siebkorb (REF 50-990-40-04) und die Lagerung für Zubehör (REF 50-990-41-04).